


1

Matériel nécessaire:
pot à urines stérile et urotube

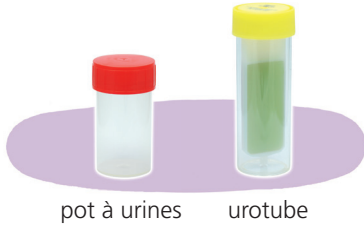

2

Minimum 2h




Obtenir un prélèvement d'urines «mi-jet» (ou «2^{ème} jet») après 2 heures de rétention au minimum et toilette urogénitale sans savon (recommandations: voir fiche n°8 RECUEIL D'URINES «2^{ÈME} JET» OU «MI-JET»)

3


Ouvrir l'urotube et plonger la lame gélosée 3x brièvement dans l'urine. La gélose doit être totalement immergée, mais **ne doit pas rester plus de 10 sec.** en contact avec le liquide.

Si la quantité d'urine est insuffisante pour recouvrir la gélose, verser l'urine sur la **totalité des deux** surfaces gélosées.

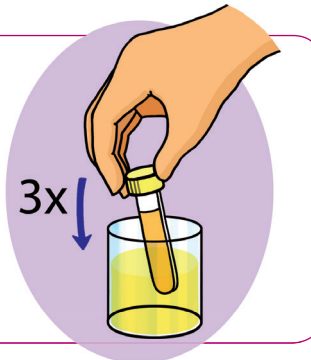


4

Retirer la lame gélosée et l'égoutter soigneusement. **Il ne doit pas rester d'urine dans le flacon de l'urotube** (risque de résultats faussement positifs!)

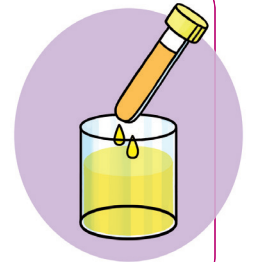

5

Replacer la lame gélosée dans son flacon. Bien refermer l'urotube. Inscrire le nom et la date.

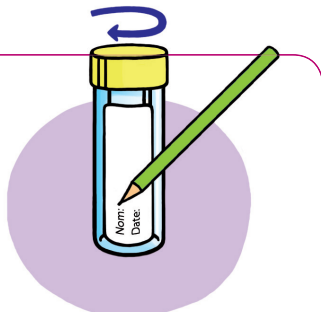


6

Faire parvenir le prélèvement au plus vite au laboratoire



OU

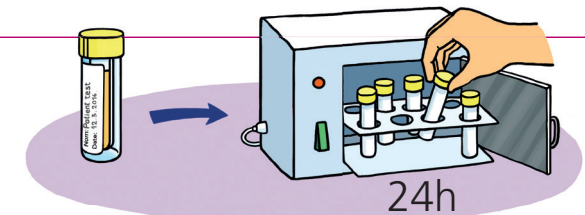

Incuber immédiatement l'urotube durant 24h à 35–37°C (incubateur dédié).