

Fiche N°13 - Ecouillons eSWAB pour tous les frottis

1



1 kit eSwab bouchon **rose**/écouvillon standard (cervix, plaies...)

ou


1 kit eSwab bouchon **bleu**/écouvillon fin (nasopharynx, urètre).

2



Effectuer le prélèvement à l'aide de l'écouvillon.

3

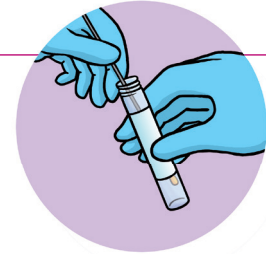

Après réalisation du prélèvement, déposer l'écouvillon dans le tube de transport.

4



Une zone de fracture permet de casser aisément l'écouvillon.


5



Laisser l'écouvillon dans le tube et revisser soigneusement le capuchon.


Kits **bleus**: il est normal que la tige de l'écouvillon dépasse du tube; ne pas hésiter à refermer quand même le bouchon, la tige se pliera dans le tube.

6

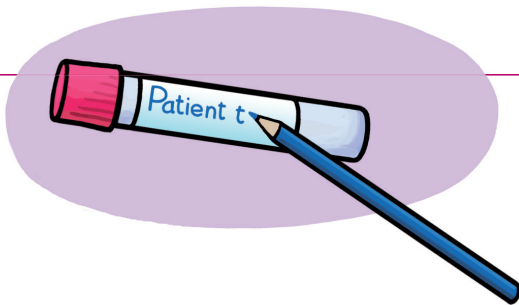


Inscrire les nom, prénom et date de naissance du patient.

7

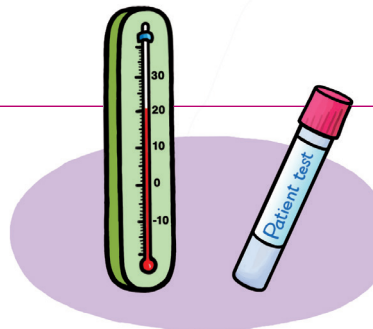

Le prélèvement peut être conservé 24 h à température ambiante

8

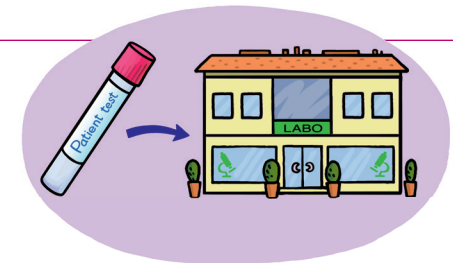

Apporter le prélèvement au laboratoire.