


# Prendia - Fiche d'instructions de prélèvements avec système Monovette

1


Matériel nécessaire:

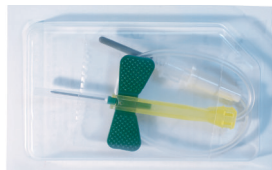

1 tube EDTA + 1 tube STRECK + 1 set BD + 2 Conteneurs

2


Prise de sang sur Sarstedt Monovette

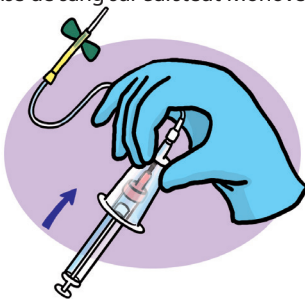

Utiliser le holder  
Introduire le tube Monovette dans le holder et procéder au prélèvement de sang.  
Retirer le tube Monovette et mélanger le contenu du tube en inversant 10X le tube.

3

Prise de sang sur Streck

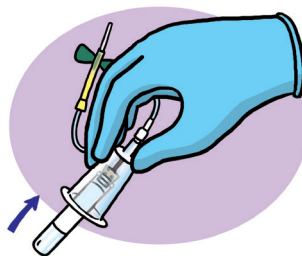

Utiliser le holder  
Introduire le tube Streck dans le holder et procéder au prélèvement de sang.  
Retirer le tube Streck et mélanger le contenu du tube en inversant 10X le tube.

4

Expédition





Ranger les tubes dans les conteneurs livrés avec le set.  
Prendia et référez-vous aux instructions livrées avec le set.

# Prendia - Entnahmeanleitung für das Monovetten-System

1


## Benötigtes Material:

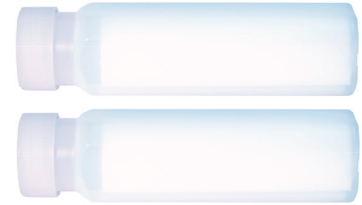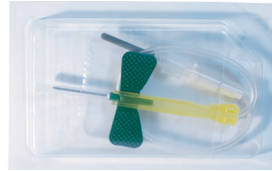

1 EDTA-Röhrchen + 1 Streck-Röhrchen + 1 BD Set + 2 Behälter

2


## Blutentnahme mit Sarstedt-Monovetten

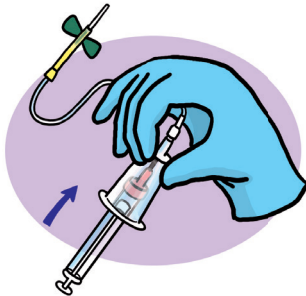

Benutzen Sie den Halter.  
Monovetten-Röhrchen einschieben und Blutentnahme durchführen.  
Monovetten-Röhrchen entfernen und Röhrchen 10x invertieren.

3


## Blutentnahme mit Streck-Röhrchen

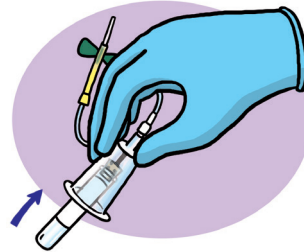

Benutzen Sie den Halter.  
Streck-Röhrchen einschieben und Blutentnahme durchführen.  
Streck-Röhrchen entfernen und Röhrchen 10x invertieren.

4

## Versand

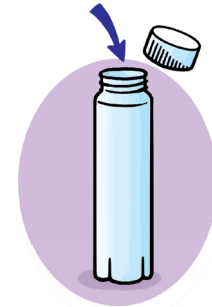

Bewahren Sie die Röhrchen in den mit dem Prendia-Set gelieferten Behältern auf und beachten Sie die im Set beigelegten Anweisungen.